

הוראות שימוש למנוף חשמלי

חובה להשתמש במנוף אך ורק לאחר קבלת הדרכה מפיזיותרפיסט או איש מקצוע מוסמך.

1. לפני השימוש יש להטעין את הסוללות לפחות 10 שעות.

2. בעת השימוש במנוף יש:

א. לנתק את הכבל מהחשמל.

ב. לוודא שכפתור החירום האדום [הנמצא על קופסת הבקרה] אינו לחוץ פנימה.

המנוף אינו עובד כאשר אינו טעון / מחובר לחשמל / כפתור החירום האדום לחוץ

3. אין להשתמש מעבר למשקל המצוין ע"ג המנוף והערסל.

4. בעת תקלה כללית - להורדת המנוף באופן ידני יש להרים את תופסן הברזל בראש מוט ההרמה מעל המנוע, ולסובב את המוט בכיוון השעון.

5. אין לבצע שינויים/תיקונים במכשיר.

האחריות על השימוש במנוף והערסלהינו על המשתמש בלבד.

