

הוראות שימוש קלנועית חשמלית

חלקי המכשיר

< שלדת קלנועית עם כידון < מושב מתכוונן עם ידיות < מטען ייעודי < סוללה נשלפת

מערכת ההפעלה והכידון

1. **נסיעה:** ודאו שהקלנועית במצב D (ידית צהובה מאחורי הכיסא בבסיס).
2. **הפעלה:** השתמשו במפתח להדלקה, סובבו את המפתח חצי סיבוב לימין.
3. **כיבוי:** סובבו את המפתח חצי סיבוב לשמאל.
4. **קביעת מהירות:** בחרו את מהירות הנסיעה על-ידי סיבוב הכפתור המרכזי:
 - < לנסיעה איטית – לכיוון הצב < לנסיעה מהירה – לכיוון הארנב
5. **בקרת נסיעה:**
 - < לנסיעה קדימה – לחצו על הידית הימנית. < לנסיעה אחורה – לחצו על הידית השמאלית.
6. **חיווי סוללה:** מצב הטעינה מוצג באמצעות הנורות בלוח המחוונים.
7. **צופר:** לחצו על הכפתור המיועד לכך בכידון.
8. **תאורה:** לחצו על הכפתור המיועד לכך בכידון.
9. **להולכה במצב ידני:** כבו את הקלנועית והעבירו הילוך ל-N (ידית צהובה מאחורי הכיסא בבסיס).

מושב הקלנועית

1. **משענות ידיים:** ידיות המושב ניתנות להרמה לנוחות המשתמש.
2. **לכניסה ויציאה נוחות:** משכו את הידית שבצד ימין מתחת המושב, כדי לסובב את המושב ולאפשר כניסה ויציאה קלות.

טעינה

1. **חיבור לחשמל:** ראשית חברו את המטען לשקע החשמל, ולאחר מכן חברו אותו לשקע הטעינה של הסוללה הממוקם מתחת המושב.
2. **זמן טעינה:** טעינה מלאה (100%) אורכת כשעתיים.
3. **טווח נסיעה:** טעינה מלאה מספיקה לנסיעה עד כ-20 ק"מ (הטווח תלוי במשקל המשתמש, בתנאי הדרך ובמצב הסוללה).
4. **טעינה ביתית:** ניתן לשלוף את הסוללה ולהטעינה בתוך הבית במידת הצורך.

פירוק

< מושב: הרימו את המושב כלפי מעלה עד שליפה מלאה. < **קיפול הכידון:** שחררו את הבורג שבתחתית הכידון.

מידע נוסף

- **שחרור נעילה:** אם הקלנועית דלוקה ואינה נוסעת, כבו אותה, העבירו למצב D והדליקו מחדש.
- **הסתגלות:** מומלץ להתחיל בנסיעה במהירות הנמוכה ביותר, עד הכרת הקלנועית ויכולת התמרון של המשתמש.
- **ניקיון:** ניקוי הקלנועית ייעשה במטלית לחה או במגבון.

אזהרות

- בנהיגה בקלנועית יש לשמור על כללי החוק והבטיחות.
- יש להקפיד על נהיגה במהירות מתאימה לתנאי הדרך, לסביבה ולמשתמש.
- יש לגלות תשומת לב מיוחדת בעת עלייה על מדרכות או ירידה מהן.
- לפני היציאה לדרך יש לוודא שהסוללה טעונה והקלנועית תקינה.

