


# הוראות למשאבת חלב חשמלית pc3 'שרהלה'

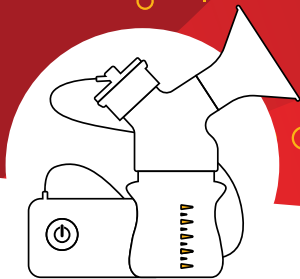

## הוראות הפעלה:

- 1.** חברו את צינורית הערכה לאחד מפתחי הצינורית במכשיר. חברו ערכה אחת לצד ימין (R) או לצד שמאל (L), או חברו שתי ערכות לשני הצדדים.
- 2.** הפעלה אוטומטית/ברירת מחדל - כאשר המשאבה מחוברת לחשמל, לחיצה על כפתור ההפעלה (האמצעי) תפעיל את קוצב הזמן (טיימר), המכוון אוטומטית ל-30 דקות. המשאבה תתחיל לפעול במצב עיסוי - stimulation (עידוד ייצור חלב), בעוצמה 1 בשני הצדדים בו-זמנית, למשך שתי דקות. לאחר מכן תעבור המשאבה למצב שאיבה - Expression, בעוצמה 3.
- 3.** כדי לשנות את עוצמת השאיבה יש לבחור צד שאיבה על ידי לחיצה על הכפתור התחתון (R, או D לדו-צדדי). כדי לשנות מצב, לחצו על הכפתור העליון (שעליו מצוירות טיפות). הלחיצה תעביר את המשאבה ממצב עיסוי (stimulation) למצב שאיבה מלאה (expression), וכן להפך.  
כדי לכוון עוצמה, לחצו על מקשי כיוון העוצמה + / -.  
אפשר לקבוע את העוצמה הרצויה לכל צד בנפרד. כדי לעשות זאת, בחרו צד שאיבה וכוונו את עוצמת השאיבה. חזרו על הפעולה עבור הצד השני. אפשר לשנות את העוצמה גם בזמן השאיבה.

## במהלך השאיבה:

- המשאבה תעבוד שלוש דקות ברצף, ותכבה אוטומטית לאחר מכן.
- אם מפעילים את המשאבה ע"י שעון שבת, המשאבה תופעל בעוצמת שאיבה 1. למניעת כיובי המכשיר לחלוטין לאחר השימוש בפעם הראשונה, כוונו את השעון לזמן פעולה הקצר משלושים דקות. כיוון השעון ליותר משלושים דקות יגרום לכיובי מנגנון המשאבה, כך שלאחר מכן היא לא תידלק שוב במשך השבת.

## חשוב לדעת:

- במקרה של עוצמת שאיבה נמוכה מדי, בדקו את כל נקודות החיבור בין המשאבה לערכה, וודאו שהכול מחובר ומהודק היטב.
- השימוש במשאבת החלב 'שרהלה' מחייב שימוש בערכה הייעודית של חברת 'שרהלה' בלבד.
- השתמשו במשאבת החלב רק לצורך ביתי ובשימוש סביר והוגן.
- במקרה של תקלה פנו לסניף.
- אין לבצע במשאבה שום שינוי או תיקון.
- נקו את המשאבה במטלית יבשה בלבד.

