

## הוראות שימוש בכיסא גלגלים

- **לפתיחת הכיסא יש לדחוף את מוטות המושב כלפי מטה.**
- **לקיפול הכיסא יש למשוך את המושב ממרכזו כלפי מעלה.**
- **לעצירת הכיסא יש למשוך/לדחוף את ידית המעצור מצידי הכיסא (בהתאם לסוג הכיסא).**
- **לשליפה/הרמה של דוכנות הכיסא יש ללחוץ על הכפתור/לשונית השחרור (בהתאם לסוג הכיסא).**
- **לפירוק הרגליות יש ללחוץ על הכפתור או למשוך את לשונית השחרור, לסובב את הרגלית כלפי חוץ ולמשוך אותה כלפי מעלה. להרכבת הרגליות יש לעשות את הפעולות הנ"ל בסדר הפוך (בהתאם לסוג הכיסא).**

### בטיחות

השימוש בכיסא בהתאם לייעודו בלבד ובמשקל תואם בלבד. אין לרדת/לעלות מדרגות עם הכיסא.

