

# הוראות שימוש כיסא גלגלים חשמלי

## חלקי המכשיר

< כיסא גלגלים חשמלי מתקפל < יחידת בקרה (ג'ויסטיק) < מטען ייעודי < סוללה

## מערכת ההפעלה והשליטה (ג'ויסטיק)

1. נסיעה: ודאו שהכיסא במצב D (ידיות אדומות מאחורי הכיסא בבסיס).
2. הפעלה: לחצו על הכפתור האדום (סימון קו) להדלקת הכיסא.
3. כיבוי: לחצו על הכפתור הירוק (סימון עיגול) לכיבוי המערכת.
4. קביעת מהירות: בחרו את מהירות הנסיעה באמצעות לחיצה על כפתורי +/-.
5. חיווי סוללה: מצב הטעינה מוצג באמצעות הנורות בלוח המחוונים.
6. צופר: לחצו על כפתור הצופר ביחידת הבקרה.
7. להולכה במצב ידני: כבו את הכיסא בלחיצה על הכפתור הירוק והעבירו הילוך ל-N (ידית צהובה מאחורי הכיסא בבסיס).

## מושב ונחות

1. משענות ידיים: הידיות ניתנות להרמה על ידי משיכת הכפתור השחור החוצה (תחת הידית).
2. כיוון גב הכיסא: להטיית משענת הגב השתמשו בידית הייעודית שתחת המושב בצד ימין.

## טעינה

1. חיבור לחשמל: ראשית חברו את המטען לשקע החשמל, ולאחר מכן חברו אותו לשקע הטעינה שמתחת יחידת הג'ויסטיק.
2. זמן טעינה: טעינה מלאה (100%) אורכת 6 עד 8 שעות.
3. טווח נסיעה: טעינה מלאה מספיקה לנסיעה עד כ-22 ק"מ (הטווח תלוי במשקל המשתמש, בתנאי הדרך ובמצב הסוללה).

## קיפול ופתיחה

1. קיפול: הרימו את הרגלית, לחצו על הכפתור האדום שמתחת גב הכיסא ודחפו את משענת הגב קדימה.
2. פתיחה: הרימו את גב הכיסא כלפי מעלה עד שמיעת צליל קליק.

## מידע נוסף

**שחרור נעילה:** אם הכיסא דלוק ואינו נוסע יש לכבות אותו, להעביר הילוך ל-D ולהדליק מחדש.  
**הסתגלות:** מומלץ להתחיל בנסיעה במהירות הנמוכה ביותר, עד הכרת הכיסא ויכולת התמרון של המשתמש.  
**ניקיון:** ניקוי הכיסא ייעשה במטלית לחה או במגבון.

## אזהרות

- יחידת הג'ויסטיק רגישה מאוד למכות ועלותה גבוהה. יש לנהוג בה בזהירות יתרה כדי למנוע נזק.
- בנהיגה בכיסא יש לשמור על כללי החוק והבטיחות.
- יש להקפיד על נסיעה במהירות מתאימה לתנאי הדרך, לסביבה ולמשתמש.
- אין לעלות למדרכות או לרדת מהן באמצעות הכיסא.
- לפני היציאה יש לוודא שהסוללה טעונה והכיסא תקין.

