

הוראות שימוש למיטת בית חולים

1. ניתן לנעול את 4 גלגלי המיטה ע"י לחיצה על הברקס כשהגלגל כלפי פנים.
2. ודאו שאין חפץ או כל דבר אחר המפריע לתנועת המיטה.
3. להורדת המעקות - יש להרים קלות את המעקה ולמשוך את לשונית השחרור/ללחוץ על כפתור השחרור בשני צידי המעקה.
4. להעלאת המעקות - יש להרים את המעקה כלפי מעלה עד לשמיעת הקליק.
5. פונקציות הניתנות לשינוי ע"י לחצנים, לפי הסימון בשלט:
 - העלאה והורדה של משענת הראש
 - העלאה והורדה של אזור רגלי החולה
 - העלאה והורדה של כל המיטה
 - הטיית המיטה ע"י העלאת צד אחד (ראש המיטה)

בטיחות

- משקל המטופל עד 145 ק"ג.
- חיבור החשמל לשקע תקני בלבד.
- הרכבה וכירוק ייעשו ע"י אדם המוסמך לכך או ע"י הדרכה.
- בכל מקרה של תקלה יש לפנות למחלקת השאלת ציוד רפואי (בשעות הפעילות).
- אין לבצע שום שינויים/תיקונים במיטה באופן עצמאי.

