

הוראות שימוש למשאבה למזרן אוויר

1. פרסו את מזרן האוויר על מזרן המיטה כשפתחי האוויר ממוקמים באזור הרגליים.
2. תלו את המשאבה על דופן המיטה באופן בטוח למניעת נפילה.
3. חברו היטב את שני הצינורות לפתחי האוויר שבמזרן, ובצידם השני חברו אותם לפתחי יציאת האוויר שבצד המשאבה.
4. חברו את המשאבה לשקע החשמל.
5. לחצו על מתג ההפעלה.
6. כווננו את המשאבה למשקל המקסימלי.
7. המנוע נכנס למצב ניפוח שנמשך כ-25 דקות, עד שהמזרן מנופח.
8. כווננו את המנוע לפי משקלו של המטופל.
9. יש להשאיר את המשאבה פעילה 24/7.

